



# INVACARE ROLLATOREN

Stets sicher zu Fuß





## Finden Sie Ihren Weggefährten

Erkunden Sie neue Wege und täglich neue Möglichkeiten. Aber vor allem: Entdecken Sie den Begleiter, auf dessen Unterstützung Sie jeden Tag zählen können! Mit einem Invacare Rollator wird das Gehen wieder leichter, die Spaziergänge länger und Ihre Selbstständigkeit größer. In die praktischen Taschen können Sie Ihre Einkäufe packen und wenn Sie eine Pause benötigen, setzen Sie sich einfach auf Ihren Rollator.

Übersicht & Entscheidungshilfe

S. 4

---

### Dolomite Rollatoren

S. 6

*Dolomite **Gloss***

S. 7

*Dolomite **Jazz***

S. 9

*Dolomite **Legacy***

S. 10

*Dolomite **Brass***

S. 11

*Dolomite **Soprano***

S. 12

*Dolomite **Maxi+***

S. 13

*Dolomite **Melody***

S. 14

*Dolomite **Alpha Basic / Alpha Advanced***

S. 15

---

### Invacare Rollatoren

S. 16

*Invacare® **Banjo***

S. 17

*Invacare® **Delta***

S. 18

---

**Richtige Anwendung**

S. 19

**Ausstattung und Zubehör**

S. 21

**Technische Daten Übersicht**

S. 22

## Sicher unterwegs mit dem Rollator

Ab jetzt immer gut zu Fuß: Mit unseren Rollatoren der Marken Invacare oder Dolomite gehen Sie jederzeit sicher gestützt, stabil und einfach leichter. Ob zum draußen oder drinnen – unsere Rollatoren sind leichtgängig, wendig und stabil. In Kombination mit einer schicken Einkaufstasche bzw. -korb, einem Rückengurt oder einem Stockhalter\* haben Sie Ihren persönlichen Alltagshelfer stets zur Hand.



## Welcher Rollator passt zu mir?

Vorrangiger Einsatzort?	Gloss <b>NEU!</b>	Jazz	Legacy	Brass <b>NEU!</b>	Soprano	Maxi+	Melody	Alpha Basic / Alpha Advanced	Banjo	Delta
In häuslicher Umgebung	●●●	●●●	●●	●●●	●	●	●●	●●	●●	●●●●
Befestigte Wege	●●●●	●●●●	●●●	●●●	●●●●	●●	●	●●	●●●	●
Unbefestigte Wege	●●●	●●●	●●●	●●	●●●●	●●	●	●	●●	●
<b>Max. Belastbarkeit</b>										
Bis 125 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bis 130 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
Bis 150 kg	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-
Bis 160 kg	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-
Bis 200 kg	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
<b>Körperbau</b>										
Groß, eher kräftig	●●●●	●●●●	●●●	●●●	●●●●	●●●●	●●●	●●	●●●	●●
Klein, eher zierlich	●●●●	●●●●	●●●	●●●	●	●	●●	●●●	●●	●●●●
<b>Mitnahme im Auto?</b>	●●●●	●●●●	●●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●	●●●	●●●●

Gewichtung: Von bestens geeignet = ●●●●●  
bis weniger geeignet = ●

\*je nach Modell erhältlich



### Extra schmal, kompakt & stilvoll Stark im Design, leicht im Gewicht

NEU!

Ring frei für die absoluten Leichtgewichte – die Modelle der Dolomite **Gloss** Reihe sind genauso modern und schlank wie sie stabil und robust sind.

Alle vier Modelle sind sehr belastbar und extra ergonomisch, beispielsweise durch anpassbare Griffe, die nach vorne gerichtet sind. Auch dank zahlreichen Optionen und Zubehör passt sich der Dolomite **Gloss** an Sie und Ihre Bedürfnisse an.

Der hochwertige Aluminiumrahmen rundet das zurückhaltende, moderne Design ab.

#### Der Dolomite **Gloss** in 4 Modellgrößen:

	<b>Gloss 450</b>	<b>Gloss 520</b>	<b>Gloss 600</b>	<b>Gloss 680</b>
Gewicht	5,9 kg	6,3 kg	6,5 kg	6,8 kg
Maximale Belastbarkeit	160 kg	160 kg	160 kg	160 kg
Sitzhöhe	45 cm	52 cm	60 cm	68 cm
Sitzbreite	37 cm	44,5 cm	44,5 cm	44,5 cm

### Allrounder oder Spezialist?



Ihr Dolomite Rollator ist jeden Tag mit dabei und unterstützt Sie zuverlässig. Innovative Funktionen und durchdachte Lösungen machen Dolomite Rollatoren zum beliebten Begleiter für mehr Mobilität im Alltag.

- ▶ **Markenzeichen Beinfreiheit** ermöglicht einen natürlichen Gang bei allen Modellen
- ▶ **Praktische Sitzmöglichkeit:** Auf Schritt und Tritt hält er Ihnen einen Platz zum Durchatmen frei
- ▶ **Vielseitiges Zubehör** zum Anpassen an Ihre Bedürfnisse
- ▶ **Einfach zusammenklappen**, platzsparend verstauen und bequem transportieren
- ▶ **Wieder eigenständig unterwegs sein** – für mehr Unabhängigkeit und Selbstvertrauen!





### Verstauen, transportieren – alles kein Problem

Ein Highlight des *Dolomite Gloss* ist sein praktischer und platzsparender Faltmechanismus: Das stabile, patentierte Sitzbrett lässt sich ganz leicht falten, sodass der *Gloss* sich erstaunlich schmal zusammenfallen lässt.

Sie können ihn einfach im PKW oder in öffentlichen Verkehrsmitteln mitnehmen oder in einer Nische verstauen.

Zuhause, beim Einkaufen und spazieren gehen – er ist immer mit dabei und bietet Ihnen sicheren Halt.



\*Gilt für die Modelle Gloss 520, Gloss 600 und Gloss 680



### Ausgezeichnet! Top Design und bestätigte Sicherheit

Ein perfekter Alltagsbegleiter, der gleich zwei Mal ausgezeichnet wurde: Für sein schönes Design gewann der *Dolomite Jazz* den 'reddot design award'. Die Stiftung Warentest verlieh ihm die Note 1,8 für seine herausragende Sicherheit.

Zur Sicherheit zählen auch seine starken und leichtgängigen Bremsen, die Ihnen jederzeit Halt bieten. Für den Transport ist der *Dolomite Jazz* einfach und platzsparend zusammenfaltbar.



reddot design award  
winner

	<i>Jazz 510</i>	<i>Jazz 610</i>
Gewicht	7,5 kg	7,8 kg
Maximale Belastbarkeit	150 kg	150 kg
Sitzhöhe	51 cm	61 cm
Sitzbreite	45 cm	45 cm



**Wendig und leicht**  
Damit Ihnen nichts im Wege steht



Der *Dolomite Legacy* ist schmal und besonders leicht konstruiert. Dieser Rollator bietet Ihnen volle Bewegungsfreiheit, ob beim Einkaufen oder auf engen Wegen. Seine Bremsen verleihen sicheren Halt und sind mit sehr wenig Kraftaufwand bedienbar.

Wenn Sie Wert auf einen sehr leichten Rollator mit viel Beinfreiheit legen, ist der *Dolomite Legacy* perfekt für Sie.

	<i>Legacy 520</i>	<i>Legacy 600</i>
Gewicht	7,2 kg	7,6 kg
Maximale Belastbarkeit	150 kg	150 kg
Sitzhöhe	54 cm	62 cm
Sitzbreite	42 cm	42 cm



**Für alle(s) zu haben**  
Selbstständig gehen & sicher sitzen

**NEU!**

Dürfen wir vorstellen: Der Rollator *Dolomite Brass*, so leicht und wendig, dass er bald Ihr Lieblingsbegleiter für Zuhause wird. Mit seinem Aluminiumrahmen verleiht er Ihnen die Stabilität, die Sie im Alltag brauchen. Ein absoluter Bonus: seine angenehmen, ergonomischen Griffe.

Er ist besonders platzsparend zusammenfaltbar und lässt sich mit den pannensicheren Reifen mühelos über verschiedene Oberflächen rollen – egal, ob im Innen- oder Außenbereich. Für entspannende Verschnaufpausen sorgen die gepolsterte Rückenlehne sowie der stabile Sitz.

	<i>Brass</i>
Gewicht	7 kg
Maximale Belastbarkeit	135 kg
Sitzhöhe	56,6 cm
Sitzbreite	35 cm



**Robust und zuverlässig**  
Der ideale Outdoor-Rollator



Der *Dolomite Soprano* ist hart im Nehmen und auf Langlebigkeit ausgelegt. Dank seiner großen Räder überwinden Sie problemlos Unebenheiten im Gelände. Dabei bleibt der Rollator jederzeit leicht lenkbar.

Ausgestattet mit einer pannensicheren Bereifung und einem kabellosen Bremssystem bietet der *Dolomite Soprano* höchste Sicherheit. Auf dem *Soprano* können Sie besonders sicher und bequem Platz nehmen: Die Sitzfläche ist angenehm breit und bis 160 kg belastbar.

	<i>Soprano</i>
Gewicht	10,8 kg
Maximale Belastbarkeit	160 kg
Sitzhöhe	62 cm
Sitzbreite	43,5 cm



**Einfach stark**  
Perfekt für kräftige Nutzer



Der *Dolomite Maxi+* ist extra stabil. Dieser Rollator gibt Ihnen jederzeit ein sicheres Gefühl – auch bei Belastungen bis zu 200 kg.

Trotz seiner hohen Stabilität ist der *Dolomite Maxi+* platzsparend transportierbar und schnell einsatzbereit. Kräftige Bremsen und pannensichere Reifen runden das Sicherheitspaket ab.

	<i>Maxi+ 550</i>	<i>Maxi+ 650</i>
Gewicht	9,8 kg	10,3 kg
Maximale Belastbarkeit	200 kg	200 kg
Sitzhöhe	55 cm	65 cm
Sitzbreite	52 cm	52 cm



**Optimal anpassbar**  
**Zwei Körperseiten –**  
**verschiedene Bedürfnisse**



*Dolomite Melody* passt sich Ihnen an. Besonders Schlaganfallpatienten profitieren von seinen zahlreichen Einstellmöglichkeiten.

Der Rollator lässt sich dank Hemiplegie-Griff auch mit der beeinträchtigten Körperseite schieben. Gebremst wird mit der Einhandbremse auf der aktiven Körperseite.

Bremse sowie Schiebegriff sind individuell einstellbar und für beide Seiten, links und rechts, erhältlich.

Schmal zusammengefoldet nehmen Sie den *Dolomite Melody* einfach mit und machen auch vor Stock und Stein nicht halt – dafür sorgt die pannensichere Bereifung.

	<i>Melody M</i>	<i>Melody L</i>
Gewicht	7,7 kg	7,9 kg
Maximale Belastbarkeit	135 kg	135 kg
Sitzhöhe	53 cm	53 cm
Sitzbreite	43,5 cm	43,5 cm



**Vielseitig und verlässlich**  
**Unabhängigkeit ohne Kraftaufwand**



Beide Modelle – *Dolomite Alpha Basic* und *Dolomite Alpha Advanced* – sind dank verschiedenen Unterarmauflagen optimal für Nutzer mit mangelnder Stützkraft und eingeschränkter Ellenbogenstreckung geeignet, vor allem bei Arthritis. Beide Rollatoren können mit einer Unterarm- oder Armauflage vorkonfiguriert werden.

**Basic oder Advanced - das macht den Unterschied:**

*Dolomite Alpha Advanced* ist zusätzlich mit Multifunktions-Bremsgriffen ausgerüstet. Sie lassen sich individuell in alle Richtungen anpassen und dank Kugelgelenk optimal für Sie einstellen. Dadurch können Sie entscheiden: Die Brems- und Feststellfunktion wird wahlweise durch Heranziehen oder Wegdrücken der Multifunktionsgriffe ausgelöst.

	<i>Alpha Basic</i>	<i>Alpha Advanced</i>
Gewicht	11,3 kg	12,2 kg
Maximale Belastbarkeit	125 kg	125 kg
Sitzhöhe	62 cm	62 cm
Sitzbreite	36 cm	36 cm







**Mit Invacare Rollatoren unbeschwert unterwegs sein**

Ob für Spaziergänge, Einkäufe oder Gartenarbeiten – Invacare Rollatoren sind nicht nur leicht manövrierbar und zuverlässig, sondern verfügen auch über viele praktische Funktionen.

Dank der hochwertigen Materialien sind die Rollatoren robust und hoch belastbar. Gleichzeitig sind sie leicht genug, um sie einfach zu manövrieren und unterwegs mitzunehmen.

Entdecken Sie die Invacare Rollatoren!

**Praktisch und bewährt**  
**Volle Flexibilität für unterwegs**



Der *Invacare Banjo* ist zu jederzeit ein guter Begleiter. Mit Einkaufskorb, abwischbarer Ablage und Stockhalter sind im Lieferumfang enthalten. Sein idealer Schwerpunkt sorgt für ein besonders leichtgängiges Fahren. Auch bei Dämmerung können Sie bedenkenlos unterwegs sein. Die fest angebrachten Reflektoren sorgen für Sicherheit.

	<i>Banjo</i>
Gewicht	9 kg
Maximale Belastbarkeit	130 kg
Sitzhöhe	61 cm
Sitzbreite	39 cm



**Wendig wie kein anderer**  
**Der Rollator für zu Hause und unterwegs**



Dieses dreirädrige Gehrad ist an Wendigkeit kaum zu toppen. Durch den körpernahen Schwerpunkt lässt es sich spielend lenken. Auch Hindernisse können Sie sicher und problemlos überwinden.

Das *Invacare Delta* Gehrad können Sie einfach und schnell zusammenklappen – so sparen Sie noch mehr Platz, ob beim Transport im Kofferraum oder im öffentlichen Nahverkehr. Seine Transporttasche kann beim Fahren am Gehrad bleiben, oder abgenommen werden.

*Invacare Delta* verfügt serienmäßig über einen stabilen Korb und pannensichere Reifen.

	<i>Delta</i>
Gewicht	6 kg
Maximale Belastbarkeit	135 kg
Gesamthöhe	83 - 95 cm
Gesamtbreite	68 cm



**So stellen Sie Ihren Rollator richtig ein**



**1** Stellen Sie sich aufrecht an den Rollator.



**2** Gehen Sie so nah wie möglich am Rollator.



**3** Die Höhe der Schiebegriffe ist richtig, wenn Ihre Arme ausgestreckt sind.

**So überwinden Sie Stufen**



**1** Fahren Sie mit dem Rollator an den Beginn der Stufe.



**2** Treten Sie auf die Stufenhilfe neben dem rechten Hinterrad und ziehen Sie die Handgriffe zu Ihrem Körper.



**3** Stellen Sie die Vorderräder auf die Stufe und gehen Sie **im** Rollator über die Stufe.

**So sitzen Sie richtig**



**1** Drücken Sie die Bremsen nach unten und fixieren Sie den Rollator.



**2** Stellen Sie sich rückwärts in den Rollator und halten Sie sich beim Hinsetzen an den Griffen fest.



**3** Die Handgriffe sind auch eine ideale Ablage für die Arme.

Welche Wahl Sie auch treffen – ein Rollator von Invacare bietet Ihnen immer ein Höchstmaß an Sicherheit.

## Qualitätsanspruch weltweit

Mit einem Rollator von Invacare können Sie sich auf die Kompetenz eines Weltmarktführers verlassen. In unser umfangreiches Hilfsmittel-Programm fließt die Erfahrung von Experten aus aller Welt.

## Vertrauen Sie Ihrem Gefühl!


Wenn Sie einen unserer Rollatoren ausprobieren, spüren Sie, welchen Wert wir auf angenehmes Fahren und Zuverlässigkeit legen. Sie werden schnell erkennen, welches Modell Ihnen am besten behagt – damit Sie tagtäglich bequem und sicher weiter kommen.



Entdecken Sie die Besonderheiten unserer Rollatoren – welches Modell Ihnen welche Ausstattung bietet, erfahren Sie in der Tabelle auf der nächsten Seite.



1 Ein passender Korb für die Mitnahme diverser Gegenstände

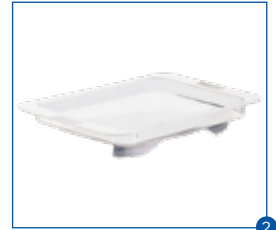

2 Das Tablett ist abwischbar und lässt sich abnehmen



3 Mit dem Rückengurt sitzen Sie sicher auf dem Rollator



4 Polsterung für den Rückengurt für ein angenehmeres Anlehnen



5 Stockhalter für den Gehstock



6 Ins Rohr integrierte Bremskabel sind besser geschützt



7 Einhandbremse mit gleichmäßiger Bremswirkung auf beiden Seiten



8 Für die Versorgung mit Sauerstoff ist ein Halter für Sauerstoffflaschen verfügbar

	<i>Dolomite Gloss 450</i>	<i>Dolomite Gloss 520</i>	<i>Dolomite Gloss 600</i>	<i>Dolomite Gloss 680</i>	<i>Dolomite Jazz 510</i>	<i>Dolomite Jazz 610</i>	<i>Dolomite Legacy 520</i>	<i>Dolomite Legacy 600</i>	<i>Dolomite Brass</i>
Bestellnummer	1654615	1654630	1654631	1654632	1559201-46-27	1559202-46-27	12052-37-24 DA	12050-37-24 DA	1653548
Gewicht	5,9 kg	6,3 kg	6,5 kg	6,8 kg	7,5 kg	7,8 kg	7,2 kg	7,6 kg	7,0 kg
Gewicht inkl. mitgeliefertem Korb/Netz	6,1 kg	6,4 kg	6,7 kg	7,0 kg	7,9 kg	8,2 kg	8,3 kg	8,7 kg	7,1 kg
Sitzhöhe	45 cm	52 cm	60 cm	68 cm	51 cm	61 cm	54 cm	62 cm	56,6 cm
Sitzbreite	37 cm	44,5 cm	44,5 cm	44,5 cm	45 cm	45 cm	42 cm	42 cm	35 cm
Gesamthöhe	63,5 - 77 cm	72,5 - 86 cm	79,5 - 92 cm	91,5 - 105 cm	65 - 80 cm	75 - 100 cm	76 - 85 cm	83,5 - 92 cm	81,5 - 99,5 cm
Gesamtbreite	52 cm	59,5 cm	60 cm	61 cm	59,5 cm	59,5 cm	60 cm	60 cm	64 cm
Max. Belastbarkeit	160 kg	160 kg	160 kg	160 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	135 kg
für Körpergröße ca.	125 - 160 cm	140 - 165 cm	150 - 185 cm	165 - 205 cm	1,55 - 1,74 m	1,64 - 2,00 m	1,64 - 1,82 m	1,80 - 1,95 m	150 - 200 cm
Farbe	Grau	Grau	Grau	Grau	Anthrazit	Anthrazit	Blau	Blau	Silber

Ausstattung									
1 Transportkorb/-netz	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2 Abnehmbares Tablett	●	●	●	●	○	○	●	●	-
3 Rückengurt	○	○	○	○	○	○	○	○	●
4 Rückengurtpolster	○	○	○	○	○	○	○	○	●
5 Stock- und Gehstützenhalter	●	●	●	●	○	○	○	○	●
6 Kabelloses Bremssystem	-	-	-	-	●	●	-	-	-
7 Einhandbremse	○	○	○	○	○	○	○	○	-
8 Sauerstoffflaschenhalter	○	○	○	○	○	○	○	○	-

- Serienmäßig
- Optional
- Nicht erhältlich



	<i>Dolomite Soprano</i>	<i>Dolomite Maxi + 550</i>	<i>Dolomite Maxi + 650</i>	<i>Dolomite Melody M mit Einhandbremse</i>	<i>Dolomite Melody L mit Einhandbremse</i>	<i>Dolomite Alpha Basic</i>	<i>Dolomite Alpha Advanced</i>	<i>Invacare® Banjo</i>	<i>Invacare® Delta</i>
Bestellnummer	12030-44-23	12122-37-23	12120-37-23	12012-44-23L 12012-44-23R	12010-44-23L 12010-44-23R	12230-35-24 (mit Unterarm- auflage) / 122230-02- 35-23 (mit Armauflage)	12220-35-24 (mit Unterarm- auflage) / 12220-02- 35-23 (mit Armauflage)	1452442	1515533
Gewicht	10,8 kg	9,8 kg	10,3 kg	7,7 kg	7,9 kg	11,3 kg	12,2 kg	7,9 kg	5 kg
Gewicht inkl. mitgeliefertem Korb/Netz	11,8 kg	10,9 kg	11,4 kg	8,0 kg	7,8 kg	12,4 kg	13,1 kg	9 kg	6 kg
Sitzhöhe	62 cm	55 cm	65 cm	53 cm	61 cm	62 cm	62 cm	61 cm	ohne Sitzfläche
Sitzbreite	43,5 cm	52 cm	52 cm	43,5 cm	43,5 cm	36 cm	36 cm	39 cm	ohne Sitzfläche
Gesamthöhe	79 - 99 cm	72,5 - 89,5 cm	81,5 - 98,5 cm	71 - 91 cm	79 - 99 cm	107,5 - 131 cm	116,5 - 140 cm	71-98 cm	83 - 95 cm
Gesamtbreite	65,5 cm	70 cm	70 cm	63 cm	63 cm	65 cm	65 cm	60 cm	68 cm
Max. Belastbarkeit	160 kg	200 kg	200 kg	135 kg	135 kg	125 kg	125 kg	130 kg	135 kg
für Körpergröße ca.	1,61-1,93 m	1,61-1,85 m	1,77-1,97 m	-	-	-	-	1,62 - 1,93 m	-
Farbe	Silber	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	Silber	Rot
<b>Ausstattung</b>									
① Transportkorb/-netz	●	●	●	●	●	●	●	●	●
② Abnehmbares Tablett	●	●	●	●	●	●	●	●	●
③ Rückengurt	●	●	●	●	●	-	-	-	-
④ Rückengurtpolster	○	○	○	-	-	-	-	-	-
⑤ Stock- und Gehstützenhalter	○	○	○	-	-	-	-	●	-
⑥ Kabelloses Bremsssystem	●	-	-	●	●	-	-	-	-
⑦ Einhandbremse	-	○	○	●	●	○	○	-	-
⑧ Sauerstoffflaschenhalter	○	○	○	○	○	○	○	-	-



- Serienmäßig
- Optional
- Nicht erhältlich



Sie wünschen detailliertere Informationen, sind an einer Beratung interessiert oder möchten die Rollatoren testen?

Gerne!

**Wir sind für Sie da.**

Für weitere Produktinformationen, einschließlich der Gebrauchsanweisung, besuchen Sie unsere Webseite [www.invacare.de](http://www.invacare.de).

**Invacare GmbH**  
Am Achener Hof 8  
88316 Isny  
Deutschland  
Telefon +49 7562 700-0  
[kontakt@invacare.com](mailto:kontakt@invacare.com)  
[www.invacare.de](http://www.invacare.de)

**Invacare Austria GmbH**  
Herzog-Odilo-Straße 101  
5310 Mondsee  
Österreich  
Telefon +43 6232 553-50  
Fax +43 6232 553-54  
[info-austria@invacare.com](mailto:info-austria@invacare.com)  
[www.invacare.at](http://www.invacare.at)

**Invacare AG**  
Benkenstrasse 260  
4108 Witterswil  
Schweiz  
Telefon +41 61 48770-80  
Fax +41 61 48770-81  
[switzerland@invacare.com](mailto:switzerland@invacare.com)  
[www.invacare.ch](http://www.invacare.ch)

© 2021 Invacare International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.  
Alle in dieser Broschüre enthaltenen Informationen sind zur Zeit der Veröffentlichung nach unserem besten Wissen korrekt. Invacare behält sich das Recht vor, Produkteigenschaften ohne vorherige Absprache zu ändern.  
Rollatoren Übersicht - DE - 02/2021 - 16566

