


Label Instruction

POC1-100C, POC1-100C2

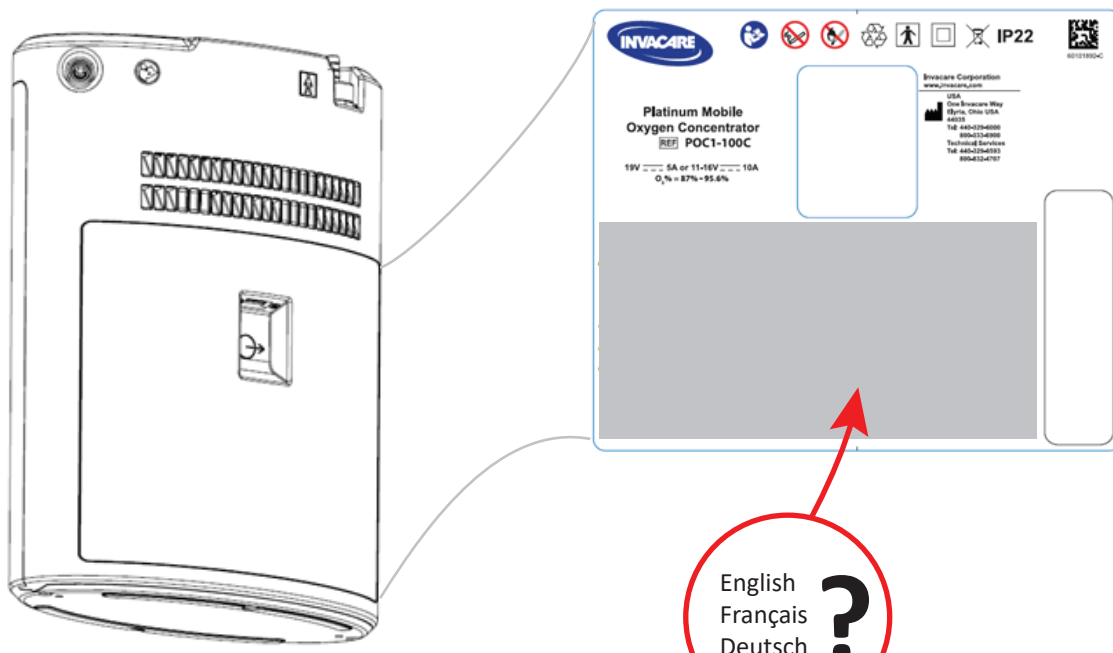

English
Français
Deutsch ?

Konform mit AAMI STD ES6061-1, ISO STD 80601-2-47, 8061-2-48, IEC STD 60611-4, 60611-11, 60611-4
CE-Zertifiziert nach STD C23.2 No. 6061-1

GEFAHR - BRANDGEFAHR
 RAUCHEN VERBODEN = ALLE Zündquellen von dem Bereich, in dem sich dieses Produkt befindet, sowie von dem Bereich, in dem der Sauerstoff verdichtet wird, fernhalten.
 Zigaretten, Öle und andere Brennstoffe sind in mit Sauerstoff angereicherter Luft leicht entzündlich und brennen mit hoher Intensität.
 Die in diesem Gerät verbundene Batterie stellt möglicherweise eine Brandgefahr dar. NICHT auseinandernehmen, verformen, auf eine Temperatur von über 82 °C (180 °F) erhitzen oder die Anschlüsse kurzschließen.

GEFAHR - STROMSCHLAGEGEFAHR
 Das Gerät NICHT auseinandernehmen. Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Wartungspersonal durchgeführt werden. Keine vom Benutzer wärmbaren Teile im Inneren.


WARUNG - VERLETZUNGSRISIKO
 Dieses Gerät ist kein lebenserhaltendes bzw. lebensunterstützendes Gerät.

ACHTUNG - Ändern Sie die Einstellung der Durchflussrate NUR, wenn sie von einem Arzt oder einem Therapeuten vorordnet wurde.

KEIN O₂ oder Sauerstoff verwendet.

Der Hersteller dieses tragbaren Sauerstoffkonzentrators (POC) hat festgelegt, dass dieses Gerät mit allen FAA-Zulassungen nur POC-Montage und -Nutzung an Bord eines Flugzeugs konform ist. 1183827-B

POC1-110

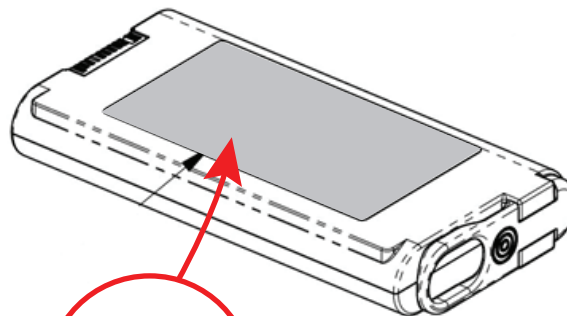

English
Français
Deutsch ?

Wiederaufladbare Lithium-Batterie
 VOR DEM VERWENDEN AUFLADEN

GEFAHR Lebensgefahr, Verletzungsrisiko oder Gefahr von Sachschäden

So verhindern Sie Todesfälle, Verletzungen oder Sachschäden aufgrund von Bränden: NICHT auf eine Temperatur von über ca. 60 °C (140°F) erhitzen, verbrennen, zerlegen oder die Anschlüsse kurzschließen. Entsprechend örtlichen Vorschriften entsorgen.

ACHTUNG Gefahr von Sachschäden
 Ausschließlich zur Verwendung mit Konzentratoren der Invacare Modellsreihe POC1-100.
 Nur mit dem Konzentrator der Serie Invacare Modell POC1-100 oder dem Akkuladegerät Invacare Modell POC1-115 aufladen.

1183827-B

